


Notice d'assemblage VISIERE DE PROTECTION

1



- 1 casquette
- 1 écran transparent
- 1 mousse médicale (alvéolaire)
- 1 mousse usage fréquent
- 1 sangle de serrage


2

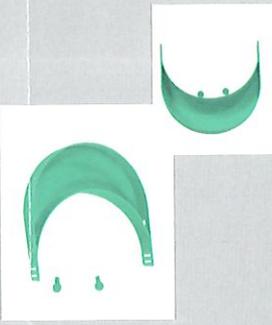

Se munir de la casquette.

Casser les liens des 2 vis à conserver pour la suite.

3

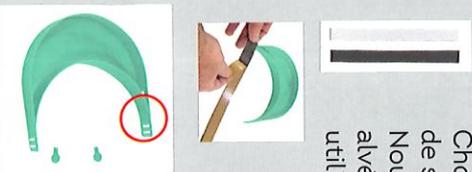

Choisir la mousse à utiliser en fonction de son utilisation. Nous recommandons la mousse alvéolaire si vous êtes le seul utilisateur.

Retirer la protection de l'adhésif présent sur la mousse.

Positionner la mousse au niveau des traits situés sur l'extrémité de la casquette. Vous obtenez le résultat ci-dessous



4



Passer la sangle élastique en suivant les représentations ci-dessous.

A faire des 2 côtés de la casquette.

5



Mise en place de l'écran de protection. Commencer par déboucher les deux pré-trous de chaque côté de la visière puis engager les extrémités de l'écran dans la casquette.

Puis basculer l'écran vers l'avant en faisant attention qu'il passe dans les fentes prévues à cet effet.

Verrouiller le tout avec les 2 vis à mettre des deux côtés de la casquette puis **ôter le film protecteur de la visière.**



Votre visière est prête à être utilisée.

